


ПОДГОТОВКА

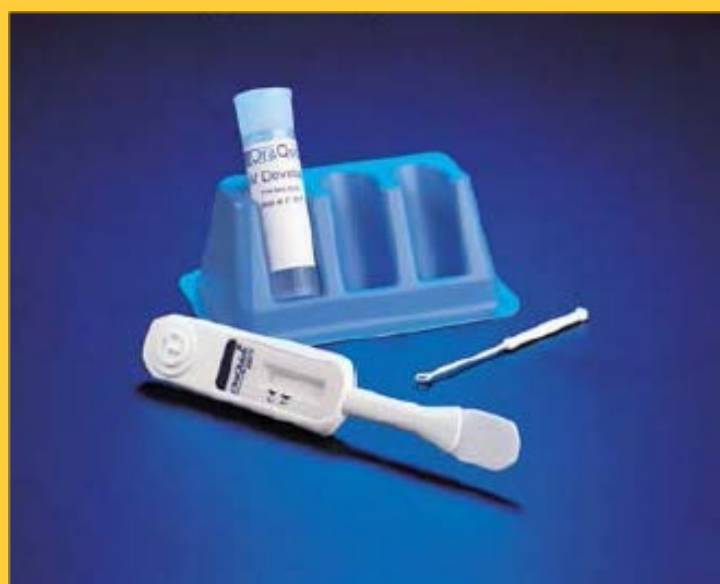

- Извлечь набор из холодильника, довести до комнатной температуры.
- Проверить целостность и срок годности теста.
- Проверить наличие в упаковке влагопоглотителя. В случае его отсутствия утилизируйте данное тестовое устройство и возьмите новое.
- Надеть медицинский халат.
- Провести гигиеническую асептику рук и надеть перчатки (для проведения каждого нового тестирования используется новая пара перчаток).
- Продезинфицировать и освободить рабочее место от всех наружных предметов.
- Записать данные тестируемого с присвоением индивидуального номера или ФИО при согласии клиента в журнал до- и послетестового консультирования.
- Вскрыть упаковку, содержащую тестовое устройство и флакон с буферным раствором.
- Вынуть из пакета штатив. Установить штатив на ровную поверхность.
- Вынуть из пакета тестовое устройство, не касаясь пластинки теста.



- Вынуть флакон с раствором из пакета.
- Промаркировать флакон с буферным раствором и тестовое устройство порядковым номером клиента.



- Флакон с буферным раствором поместить в штатив и осторожно открыть крышку.
- Поместить тест-упаковку в емкость «Отходы группы Б».

ТЕСТИРОВАНИЕ

ДО НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- за 15 минут
 - есть
 - пить
 - курить
 - жевать жевательную резинку
- за 30 минут
 - употреблять какие-либо средства гигиены полости рта

ПРОИНСТРУКТИРОВАТЬ ТЕСТИРУЕМОГО



Взять промаркированное тестовое устройство за боковые стороны и абсорбирующей пластиной теста провести по наружной поверхности десен верхней и нижней челюсти (не разрешается проводить пластиной теста по своду рта, внутренней поверхности щеки или по языку).



Тестовое устройство с забранным материалом необходимо поместить во флакон с раствором так, чтобы оно касалось дна. Окно считывания результата в устройстве должно быть обращено к Вам.



Включить таймер на 20 минут. (!) Не вынимать тестовое устройство из пробирки во время проявления теста.



- В окне результатов появится розовая жидкость, которая будет передвигаться вверх. По мере проявления теста розовая жидкость исчезнет.
- Интерпретировать результат и сообщить результат клиенту.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Если одна линия проявляется напротив треугольника «С», результат отрицательный. Это означает отсутствие в образце антител к ВИЧ.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Если напротив треугольников «С» и «Т» проявляются полоски, результат считается положительным и означает присутствие в образце антител к ВИЧ. Одна из линий может быть светлее или темнее другой.




НЕКОРРЕКТНЫЙ

Если отсутствует линия в поле «С», результат некорректный. Некорректный тест должен быть перепроверен новым тестовым устройством. Если некорректный результат был показан тестом по слюне, необходимо использовать повторный тест по крови.



Поместить использованное тестовое устройство в емкость «Отходы группы Б».

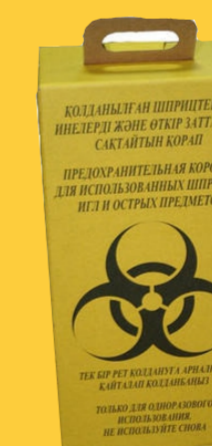

Снять перчатки наружной поверхностью внутрь, поместить в емкость «Отходы группы «Б»».

Внести данные теста в журнал до- и послетестового консультирования.



После работы все отработанные материалы утилизировать, убрать рабочую поверхность и обработать 70% спиртом. Провести гигиеническую обработку рук.